



檢驗科公告

2015/07/07

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：新增人類乳突瘤狀病毒高風險篩檢及 16/18 分型檢驗

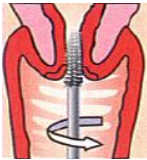
執行日期：2015/07/20

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

執行方式：

1 檢驗代碼：669521

2 檢體採集：採檢標準流程說明如下

1. 標示受檢者姓名，確認受檢者。	
2. 撕開包裝袋取出子宮頸管刷 (endocervical brush)	
3. 將刷子伸入陰道口直到刷頭接觸採檢部位，外子宮頸上的鱗狀及柱狀表皮細胞交界處，以同一方向旋轉 3 周刮取上皮細胞，採檢方法及部位與子宮頸抹片相同。	
4. 將沾有上皮細胞的子宮頸管刷放入含緩衝液的收集管中(Cobas PCR Cell Collection Media)，並在距離毛刷 2 公分處折斷，讓刷子留在採檢管中，加蓋，確認上蓋已栓緊。	

採檢前注意事項：

1. 檢體採檢前不可內診，以防潤滑劑滲入。
2. 採檢體前 24 小時不可沖洗陰道，不可用陰道塞劑，不可性交。
3. 月經期間及產後 3~4 個月內，不宜採檢，最好在月經來十天後採樣。

- 3 採檢容器：Cobas PCR Cell Collection Media
- 4 檢驗方法：Real Time PCR (Roche Cobas 4800)
- 5 參考值：HPV Type 16 : Negative
HPV Type 18 : Negative
Other High Risk HPV : Negative
(Other High Risk HPV 包括 HPV types 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, 66 and 68)
- 6 收件時間：24 小時
- 7 報告時間：14 天
- 8 收費標準：自費 1500 元
- 9 本項目委託「聯合醫事檢驗所」代檢

公告製訂：檢驗科病毒血清組組長 邱玉英〈淡水院區分機：2474〉