



■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

檢 驗 科 公 告

2016/10/17

公告項目：新增檢驗項目套組 Y610 微飛血中非結合型與總濃度監測如

下表

套組編號	檢驗代碼	檢驗項目
Y610	66094	微飛血中非結合型與總濃度
	66107	ALBUMIN 白蛋白
	66111	TOTAL BILIRUBIN 總膽紅素

執行日期：2016/10/24

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科。

執行方式：

1 檢驗方法：串聯式質譜儀定量分析。

2 檢體種類：

2.1 檢驗代碼：66094

以深綠頭 Sodium heparin 管採血，抽一管至少 3 ml 以上。

2.2 檢驗代碼：66107 及 66111

按現行生化採集模式。

2.3 檢驗代碼 66094 及 66107 與 66111 需同時段採集。

3 送檢流程：

採集檢體後立即送至檢驗科。

4 收件時間：週一 ~ 週五(遇例假日順延)。

5 操作時間：每週一上午。

6 報告時間：執行檢驗後 7 個工作日發報告，遇假日順延。

7 收費：自費 3500 元。

8 說明：

8.1 此樣品分析檢測報告精確度已經由實驗室確認，其臨床之應用應配合醫師診斷。

8.2 本檢驗方法用以輔助臨床使用黴飛藥品，檢測結果需配合病患臨床病徵及生化檢驗數據作綜合評估，不得作為病患治療或處置的唯一依據。

8.3 黴飛血中總濃度結果參考區間為：

Voriconazole(Total)濃度結果顯示	判讀參考
<1.0 μ g/mL	沒有治療效果
$\geq 1 - 1.9\mu$ g/mL	治療部分有效
4.0 μ g/mL	加做肝功能測試(GOT/GPT)
>5.5 μ g/mL	醫師應視臨床表徵決定用藥劑量

公告製訂：檢驗科特殊生化組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉

馬偕紀念醫院
Mackay Memorial Hospital