



# 醫事檢驗科公告

2018/10/08

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東

公告項目：醫事檢驗科變更檢驗項目 VISCOSITY (血清粘稠度)

(代碼 66160) 檢驗方法

執行日期：2018/10/15

公告對象：四院區各科醫師、護理部、檢驗科

說明：檢驗科變更 VISCOSITY (血清粘稠度)檢驗方法

	變更前	變更後
方法	手工法	<b>BROOKFIELD DV2T 粘度計</b>
原理	血液通過某一細管間與蒸餾水通過所需時間之比	1. 血液通過一個標準化彈簧驅動一個轉子，通過彈簧的形變程度可測得流體對轉子的粘性阻力 2. 經由微電腦計算後得到樣品的運動黏度
單位	NA (血清與水之間比值)	<b>mPa·s</b>
參考值	1.6~2.2	<b>1.6~2.2</b>
校正程序	手工法、無校正程序	有標準品
操作單位	淡水醫事檢驗科貴重儀器組	淡水醫事檢驗科貴重儀器組

執行方式：上述檢驗項目之檢體量、採檢容器、送檢流程、報告時間、報告內容等，均依照目前流程處理。

名詞解釋：mPa·s (毫帕斯卡-秒)是粘稠度的國際單位。

公告製訂：醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機：2511〉

馬偕紀念醫院  
Mackay Memorial Hospital