

醫事檢驗科公告

2020/10/28

■淡水 ■台北 ■新竹 ■台東 _

公告項目: CMV viral load(代碼 66959): 變更儀器及試劑

執行日期:2020/10/28

公告對象:四院區各科醫師、護理部、醫事檢驗科

執行方式:

1 因應分子檢測儀器升級為 cobas® 4800 系統,其新舊系統差異如下。

1.1 CMV viral load(代碼 66959):

	異動前(舊系統)	異動後(新系統)
儀器	COBAS [®] AmpliPrep/COBAS [®] TaqMan TaqMan 分析儀	cobas 4800 分析儀
試劑英文名稱	COBAS AmpliPrep/COBAS [®] TaqMan [®] CMV Test	cobas® CMV Test
試劑中文名稱	羅氏全自動達可巨細胞病毒量核 酸檢驗套組	羅氏可霸斯巨細胞病毒量核酸 檢驗組
方法學	Real-Time PCR	Real-Time PCR
標的基因	CMV DNA polymerase (UL54) gene	CMV DNA polymerase (UL54) gene
偵測型別	CMV Glycoprotein B Genotype 1-4	CMV Glycoprotein B Genotype 1-4
線性範圍(註1)	137–9100000 IU /mL	34.5–10000000 IU/mL
偵測極限(註2)	137 IU/mL	34.5 IU/mL
生物參考區間	<137 IU /mL (治療族群參考值)	Target Not Detected
結果的可報告 範圍	1. Target Not Detected 2. <137 IU /mL 3. 137–9100000 IU /mL 4. >9100000 IU /mL	1. Target Not Detected 2. <34.5 IU/mL 3. 34.5–10000000 IU/mL 4. >10000000 IU/mL

*註1、2:新系統線性範圍及偵測極限有異動,但不影響臨床判斷

2 因檢驗系統異動,自公告即日起以新系統的結果為判讀依據

注意事項:上述項目之採檢方式、送檢流程、報告時間,均依照現行作業方式處理。

公告製訂:醫事檢驗科貴重儀器組組長 黃嵩發〈淡水院區分機:2511、2512〉

展情紀念聲悠 Mackay Memorial Hospital

第1頁,共1頁

公告編號:(109)040